

偉達教育交流中心

CO-OP EDUCATION EXCHANGE CENTRE

香港鰂魚涌海澤街 28 號東港中心 1807 室 電話：25421064 傳真：25434136
網址：<http://www.coop-edu.com.hk> 電郵：coopedu@netvigator.com

槍型非接觸式紅外線快速測溫器 每部 HKD880.00 (免費送貨)

槍型非接觸式紅外線快速測溫器可安全及快速地
作為體溫有否發燒現象的快速篩選工具。



產品特點

- 精確：測量偏差 $\leq \pm 0.3$ 度。(採用進口紅外線探測系統)
- 快速：測量時間 < 1 秒鐘。
- 易用：一鍵測量，操作方便。
- 非接觸：對人體額頭測量，不接觸人體皮膚。
- 長壽命：裝 2 節 AA 電池，可使用超過 10 萬次，產品使用壽命 > 300 萬次。
- 大屏顯示：大屏幕液晶顯示，白色背光，任何光線下都可以清晰顯示。
- 溫度報警：自由設定報警溫度。
- 存儲數據：存儲 32 個測量數據，便於分析參考對比。
- 設置修改：可以修改設置參數，以適應不同膚色的人種。
- 單位轉換：使用攝氏度、華氏度可以相互轉換。

技術性能

1. 正常使用條件：環境溫度： $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ / 相對溫度： $\leq 85\%$ 。
2. 電源：DC3v (2 粒 AA 電池)
3. 尺寸： $196 \times 150 \times 50\text{MM}$ (長寬高)
4. 重量：220g
5. 測量範圍：體溫模式： $32^{\circ}\text{C} \sim 42.9^{\circ}\text{C}$ / 表面模式： $0^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
6. 精度： $32^{\circ}\text{C} \sim 36^{\circ}\text{C} = \pm 0.3^{\circ}\text{C}$; $36^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C} = \pm 0.2^{\circ}\text{C}$; $39^{\circ}\text{C} \sim 42.9^{\circ}\text{C} = \pm 0.3^{\circ}\text{C}$
7. 功耗： $\leq 50\text{mW}$
8. 測量距離： $5\text{CM} \sim 15\text{CM}$
9. 自動關機：5 秒

* 中國製造；保養期 = 1 年 (以發票日期起計)

訂購方法：

請將聯絡資料電郵 waytech@netvigator.com 或傳真 25434136 至本中心

本中心收到後會傳真訂購表給顧客，請填妥訂購表資料及傳真(2543 4136)訂購表至本中心：

- (1) 本中心確實貨物存貨後，本中心將安排於二~四個工作天內送貨 (速遞公司)；
- (2) 本中心確實貨物存貨後，請顧客派員到本中心取貨。

付款辦法：

送貨時收現金或支票 * 支票抬頭請書祈付 [偉達教育交流中心]。

有關產品詳情及實物照片，歡迎瀏覽本中心網頁，

網址：<http://www.coop-edu.com.hk>

查詢電話 25421064 王淑珍小姐

偉達教育交流中心

CO-OP EDUCATION EXCHANGE CENTRE

香港鰂魚涌海澤街 28 號東港中心 1807 室 電話：25421064 傳真：25434136
網址：<http://www.coop-edu.com.hk> 電郵：coopedu@netvigator.com

槍型非接觸式紅外線快速測溫器 每部 HKD650.00 (免費送貨)

槍型非接觸式紅外線快速測溫器可安全及快速地作為體溫有否發燒現象的快速篩選工具。



建議使用方法：

前額測量法 — 直接測量前額的溫度。

使用時，把測溫器的紅外線鏡頭對準前額約 1 吋至 4 吋，按下按鈕，即時可顯示溫度。

建議測試體溫方法：

1. 在門口適當位置設立檢查站；
2. 由於在不同環境下測試，會出現溫度差異。故此必須在檢查站附近測試最少三位工作人員的額溫，如測試溫度為 33°C、33.5°C 及 34°C，取最高額溫 34°C 為“標準額溫”；
3. 將“超標額溫”定為“標準額溫”加攝氏 1 度；
4. 如學生的額溫超出“超標額溫”，再使用其他工具（例如：耳溫槍、電子體溫計或水銀體溫計）為學生測試實際體溫。

*用電量：9 V 電池 1 粒

*重量／尺寸：135g／150 x 133 x 45 mm

*台灣製造；保養期 = 3 個月（以發票日期起計）

*槍型非接觸式紅外線快速測溫器是可關掉紅色的雷射光。

*紅外線快速測溫器即是利用感應物體發射紅外線的原理來得知溫度，對人體絕無傷害。

訂購方法：

請將聯絡資料電郵 waytech@netvigator.com 或傳真 25434136 至本中心

本中心收到後會傳真訂購表給顧客，請填妥訂購表資料及傳真(2543 4136)訂購表至本中心：

- (1) 本中心確實貨物存貨後，本中心將安排於二~四個工作天內送貨（速遞公司）；
- (2) 本中心確實貨物存貨後，請顧客派員到本中心取貨。

付款辦法：

送貨時收現金或支票 *支票抬頭請書祈付 [偉達教育交流中心]。

有關產品詳情及實物照片，歡迎瀏覽本中心網頁，

網址：<http://www.coop-edu.com.hk>

查詢電話 25421064 王淑珍小姐

偉達教育交流中心

CO-OP EDUCATION EXCHANGE CENTRE

香港鰂魚涌海澤街 28 號東港中心 1807 室 電話：25421064 傳真：25434136
網址：<http://www.coop-edu.com.hk> 電郵：coopedu@netvigator.com

超小型非接觸式紅外線快速測溫器

TN105 超小型非接觸式紅外線快速測溫器可安全及快速地作為體溫有否發燒現象的快速篩選工具。

售價：每部 HKD 300.00 (免費送貨)



(25g, 68 x 37 x 18 mm)

建議使用方法：

前額測量法 — 直接測量前額的溫度。

- (1) 使用時，把測溫器的紅外線鏡頭對準前額約 1 cm 至 2 cm，按下按鈕，即時可顯示溫度。
- (2) 使用時，把測溫器的紅外線鏡頭緊貼同學前額或太陽穴，按下按鈕，即時可顯示溫度，每次使用後，用消毒紙巾輕擦測溫器前端，即時可為下一位同學測試。

建議學校測試方法：

1. 在校門口適當位置設立檢查站；
2. 由於在不同環境下測試，會出現溫度差異。故此必須在檢查站附近測試最少三位工作人員的額溫，如測試溫度為 34.6°C、34.8°C 及 35°C，取最高額溫 35°C 為“標準額溫”；
3. 將“超標額溫”定為“標準額溫”加攝氏 1 度；
4. 如學生的額溫超出“超標額溫”，再使用其他工具（例如：耳溫槍、電子體溫計或水銀體溫計）為學生測試實際體溫。

* 用電量：CR2032 鋰鈕/鈕扣電池 1 粒

* 重量/尺寸：25g / 68 x 37 x 18 mm

* 台灣製造；保養期 = 3 個月（以發票日期起計）

* 紅外線快速測溫器即是利用感應物體發射紅外線的原理來得知溫度，對人體絕無傷害。

訂購方法：

請將聯絡資料電郵 waytech@netvigator.com 或傳真 25434136 至本中心

本中心收到後會傳真訂購表給顧客，請填妥訂購表資料及傳真(2543 4136)訂購表至本中心：

- (1) 本中心確實貨物存貨後，本中心將安排於二~四個工作天內送貨（速遞公司）；
- (2) 本中心確實貨物存貨後，請顧客派員到本中心取貨。

付款辦法：

送貨時收現金或支票 * 支票抬頭請書祈付 [偉達教育交流中心]。

有關產品詳情及實物照片，歡迎瀏覽本中心網頁，

網址：<http://www.coop-edu.com.hk>

查詢電話 25421064 王淑珍小姐